

Raskaustesti

Nopea tulos

- Havaitsee raskauden yli 99 prosentin tarkkuudella kuukautisten oletetusta alkamispäivästä alkaen.
- **Lue tämä esite huolellisesti ennen testin tekemistä.**

1 Ennen kuin aloitat

Kellosta voi olla apua testin tekemisen yhteydessä.

Voit tehdä testin mihin kellonaikaan tahansa, jos teet testin aikaisintaan kuukautisten oletettuna alkamispäivänä.

2 Tee testi

Kun olet valmis tekemään testin, poista suojakääre ja irrota suojuus. Käytä testipiukko välittömästi.

Voit testata suoraan virtsasuihkusta **tai** virtsanäytteestä, joka on kerätty puhtaaseen ja kuivaan astiaan.

- Pidä väriä vaihtava näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna **tai** kerättyä virtsanäytteessä kuvan mukaisesti **5 sekunnin ajan**.
- Väriä vaihtava näytteenottopäätä muuttuu välittömästi vaaleanpunaiseksi sen merkiksi, että virtsa imeytyy siihen. **Pidä väriä vaihtava näytteenottopäätä virtsassa täydet 5 sekuntia.**



Suojuus

Väriä vaihtava näytteenottopäätä

- Pidä väriä vaihtavaa näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna tai aseta testipiukko tasaiselle alustalle, kunnes olet valmis lukemaan tuloksen ja sininen viiva on ilmestynyt kontrolli-ikkunaan.



Pidä väriä vaihtava näytteenottopäätä virtsassa täydet 5 sekuntia.

5 sekuntia

Aloita ajanotto heti kun huomaat väriä vaihtavan näytteenottopäätä muuttuvan vaaleanpunaiseksi.

Virtsasuihku **TAI** Kerätty näyte

- Voit halutessasi asettaa suojuksen takaisin paikalleen.
- Jos väriä vaihtava näytteenottopäätä ei ole muuttunut täysin vaaleanpunaiseksi, katso kysymys 5.

3 MINUUTTIA

ODOTA 3 MINUUTTIA. Kun testi alkaa toimia, näet sinisen viivan tai viivojen tulevan näkyviin.

3 Lue tulos


Voit lukea tuloksen tulosikkunasta.

Kontrolli-ikkunassa on näyttävä sininen viiva, kun luet tuloksen. Viiva osoittaa, että testi on toiminut.

Raskaana-tulos voi tulla näkyviin yhdessä minuutissa, kun testi tehdään väliinjääneiden kuukautisten oletetun alkamispäivän jälkeen.

Sinun on odotettava 3 minuuttia, jotta tulos **Ei Raskaana** varmistuu (katso kysymys 8).

Jos kontrolli-ikkunassa ei näy sinistä viivaa, testi ei ole toiminut (katso kysymys 6).

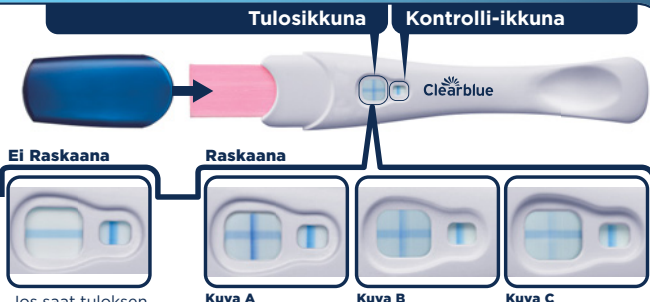

Tulosikkuna

Kontrolli-ikkuna

Ei Raskaana

Raskaana



Jos saat tuloksen **Ei Raskaana**, katso kysymys 10.



Kuva A

Kuva B

Kuva C

- Jos saat tuloksen **Raskaana**, katso kysymys 11.
- Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi, katso kysymys 7.

Jos toinen plus-merkin (+) muodostavista viivoista on vaaleampi tai tummempi kuin toinen, sillä ei ole merkitystä, vaan tuloksesi on Raskaana.

TÄRKEÄÄ! Lue tulos **10 minuutin** sisällä testin tekemisestä. Jätä huomiotta tuloksessa tämän ajan jälkeen tapahtuvat muutokset.

Kysymyksiä ja vastauksia

1 Kuinka tarkka Clearblue on?
Laboratoriotesteissä Clearblue-testin tarkkuudeksi on osoitettu yli 99 %, kun testi tehdään aikaisintaan kuukautisten odotettuna alkamispäivänä.

2 Kuinka Clearblue toimii?
Kun olet raskaana, kehosi tuottaa hCG-raskaushormonia (istukkalagonadotropiinia). hCG-hormonin määrä kehossa nousee raskauden alkuvaiheessa. Clearblue Nopea tulos tunnistaa pienetkin määrät tätä hormonia virtsassa. (Testin herkkyys on 25 mIU/ml.)

3 En ole varma, milloin seuraavien kuukautisten on määrä alkaa. Mistä tiedän, suoritanko testin oikeaan aikaan?
Saat selville kuukautisten oletetun alkamispäivän, kun määrität kuukautiskierron tavallisen pituuden laskemalla päivät kuukautisten alkamispäivästä seuraavien kuukautisten alkamista edeltävään päivään.
• Jos kuukautiskierron on epäsäännöllinen, tee testi viimeksi kuluneiden kuukausien pisimmän kierron mukaan.
Jos tulos on Ei Raskaana ja epäilet edelleen raskautta, katso kysymys 10.

4 Voiko lääkitys tai terveydentila vaikuttaa tulokseen?
Lue aina käyttämiäsi lääkkeiden käyttöohjeet ennen testin tekemistä.
• HCG-hormonia sisältävä hedelmällisyyslääkitys saattaa vääristää tuloksia (tällainen hedelmällisyyslääkitys annetaan yleensä pistoksena, ja testaaminen liian pian lääkkeen saamisen jälkeen voi antaa virheellisen Raskaana-tuloksen).
• Muiden hedelmällisyyshoitojen (kuten klomifeenisitraatti), särkylläkkeiden ja hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden (kuten ehkäisytabletit) ei pitäisi vaikuttaa tulokseen.
• Jos olet vastikään lopettanut hormonaalisen ehkäisyn tai käytät hedelmällisyyshoitoja, kuten klomifeenisitraattia, kuukautiset voivat olla epäsäännölliset, jolloin saatat testata liian aikaisin.
• Jos olet äskettäin ollut raskaana (vaikka raskaus olisi keskeytynyt ennenaikaisesti), voit saada virheellisen Raskaana-tuloksen.
• Kohdunulkoinen raskaus, munasarjakystat, vaihdevuodet ja tietyt hyvin harvinaiset sairaudet voivat vääristää tuloksia.
• Jos saat Raskaana-tuloksen, on mahdollista, että myöhemmin toteat, että et ole raskaana, mikä johtuu raskauden luonnollisesta keskeytymisestä, jota voi esiintyä raskauden alkuvaiheessa.
Jos saat odottamattomia tuloksia, keskustele niistä lääkärin kanssa.

5 Tein raskaustestin, mutta väriä vaihtava näytteenottopää ei muuttanut kokonaan vaaleanpunaiseksi. Mitä minun pitäisi tehdä?
Jos väriä vaihtava näytteenottopää ei ole muuttanut täysin vaaleanpunaiseksi, virtsan määrä on voinut jäädä liian vähäiseksi. Testi on kuitenkin toiminut, jos kontrolli-ikkunaan ilmestyy sininen viiva 10 minuutin sisällä testin tekemisestä. Jos kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa 10 minuutin kuluessa testin tekemisestä, katso kysymys 6.

6 Tein raskaustestin, mutta kontrolli-ikkunaan ei ilmestynyt sinistä viivaa. Mitä minun pitäisi tehdä?
Jos kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa 10 minuutin kuluessa testin suorittamisesta, testi ei ole toiminut. Synnä voi olla:

• Et pitänyt väriä vaihtavaa näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna tai asettanut testin vaakatasoon testauksen jälkeen.
• Virtsassa oli liikaa tai liian vähän. **Testiä on pidettävä näytteenässä 5 sekuntia.**
Tee testi uudelleen käyttämällä uutta testipuikkua ja huolehdi, että noudatat ohjeita. Voit halutessasi kerätä virtsanäytteen puhtaaseen, kuivaan astiaan ja upottaa näytteenseen vain väriä vaihtavaa näytteenottopäätä 5 sekunniksi.

7 Mitä, jos olen epävarma tuloksesta?
• Raskaana-tulos edellyttää, että 10 minuutin sisällä testin tekemisestä kontrolli-ikkunaan tulee näkyviin sininen viiva ja tulossikkunaan plusermerkki (+).
Plus-merkin (+) ulkoasu tulossikkunassa voi vaihdella, mutta plus-merkin muodostavien viivojen ja kontrolli-ikkunaan viivan tulee kuitenkin olla leveydeltään samanlaisia (katso kuvat A-C).
Kuva A
Viiva näyttää tältä todennäköisimmin silloin, kun olet raskaana ja teet testin monta päivää kuukautisten väliinjäämisen jälkeen, jolloin hCG-pitoisuudet ovat suuremmat.
Kuva B
Tämä ei ole epätavallista, kun olet raskaana ja teet testin kuukautisten oletettuna alkamispäivän tai hiukan sitä ennen tai sen jälkeen, jolloin hCG-pitoisuudet ovat edelleen suhteellisen pienet.

Kuva C
Vaikka viivat olisivat vaaleita, tämä tarkoittaa silti Raskaana-tulosta.
Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi, odota vähintään 3 päivää ennen kuin testaat uudelleen ja huolehdi, että noudatat ohjeita.
• Ei Raskaana -tulos edellyttää, että 10 minuutin sisällä testin tekemisestä kontrolli-ikkunaan tulee näkyviin sininen viiva ja tulossikkunaan miinusmerkki (-). Jos tulos on Ei Raskaana ja epäilet edelleen raskautta, katso kysymys 10.

8 Milloin voin lukea tuloksen?
Raskaana-tulos voi tulla näkyviin yhdessä minuutissa, kun testi tehdään väliinjääneiden kuukautisten oletetun alkamispäivän jälkeen. Varmista ennen tuloksen lukemista, että kontrolli-ikkunassa on sininen viiva. Sinun on odotettava 3 minuuttia, jotta tulos Ei Raskaana varmistuu. Jos kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa **10 minuutin** kuluessa, testi ei ole toiminut (katso kysymys 6).

9 Kuinka kauan tulos kestää?
Tulos voidaan lukea 3–10 minuutin aikana. Kymmenen minuutin jälkeen tuloksesta tapahtuvat muutokset on jätettävä huomiotta.
10 Testin mukaan en ole raskaana. Mitä minun pitäisi tehdä?
Et ehkä ole raskaana tai raskaushormonipitoisuus ei ole vielä riittävänsä suuri, jotta testi tunnistaisi sen, tai olet ehkä laskenut väärin kuukautisten odotetun alkamispäivän.
• Jos teit testin varhain, tee se uudelleen kuukautisten odotettuna alkamispäivänä.
• Jos kuukautisesi ovat myöhässä, tee testi uudelleen kolmen päivän kuluessa. Jos tämänkin testin tulos on Ei Raskaana eivätkä kuukautisesi ole vielä alkaneet, käy lääkärissä.

11 Testin mukaan olen raskaana. Mitä minun pitäisi tehdä?
Jos testi ilmoittaa, että olet raskaana, ota yhteyttä lääkäriin, joka neuvoa, mihin toimiin on syytä ryhtyä seuraavaksi.

www.clearblue.com
Tuoteneuvoja on paikalla arkipäivisin kello 10–13. Suomenkielinen tuoteneuvoja ei aina ole paikalla ja puheluusi saatetaan vastata englanniksi.
0800 774 150
Lankapuhelut ovat ilmaisia, matkapuheluista saatetaan veloittaa. Kaikki puhelut nauhoitetaan ja valvotaan laadunvalvontatarkoituksessa. Varaudu ilmoittamaan pakkausikän eränumeron.

Lisäohjeita sekä raskautta koskevaa tietoa ja yleistä neuvontaa saat osoitteesta: www.clearblue.com

	Valmistaja		Ei saa käyttää uudelleen.
	Eräkoodi		In vitro -diagnostinen lääketieteellinen laite
	Viimeinen käyttöpäivä		Lämpötilarajat 2–30 °C

Tarkoitettu itsetestaukseen ja kotikäyttöön.
Vain *in vitro*-diagnostiseen käyttöön.
Vain ulkoiseen käyttöön.
Ei saa käyttää uudelleen.
Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
Säilytä 2–30 °C:n lämpötilassa.
Anna lämmitetty huoneenlämpöiseksi 30 minuutin ajan, jos testiä on säilytetty jääkaapissa.
Älä käytä, jos suojakääre on vaurioitunut.
Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Testin voi hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana.

