

Visse legemidler eller medisinske tilstander kan påvirke resultatet av graviditetstesten:

- Les alltid produsentens instruksjoner for eventuelle legemidler du bruker, før du tar testen.
- Legemidler for økt fertilitet, som inneholder hCG, kan gi misvisende resultater (disse legemidlene gis vanligvis som en injeksjon, og testing for raskt etter en injeksjon kan gi et falskt positivt resultat ("Gravid").
- Annen fertilitetsbehandling (som klomifensitrat), smertestillende midler og hormonelle prevensjonsmidler (f.eks. p-piller) skal ikke påvirke resultatet.
- Dersom du nylig har sluttet å bruke hormonelle prevensjonsmidler eller får fertilitetsbehandling som klomifensitrat, kan menstruasjonene dine bli uregelmessige, slik at du tester for tidlig.
- Dersom du nylig har vært gravid (også ved avbrutt svangerskap), kan du få et falskt positivt resultat ("Gravid").
- Svangerskap utenfor livmoren, cyster på eggstokkene, overgangsalder og noen svært sjeldne medisinske tilstander kan gi misvisende resultater.
- Dersom resultatet er "Gravid", er det mulig at du senere oppdager at du ikke er gravid, på grunn av naturlig fostertap som kan forekomme i svangerskapets tidlige fase.

Dersom du får uventede resultater, bør du ta det opp med en lege/jordmor.

Med Clearblue Advanced fertilitetsmonitor kan du teste om du er gravid ved å måle graviditetshormonet, hCG, i urinen din. Ved laboratorietesting er det vist over 99 % nøyaktighet i påvisning av graviditet fra og med dagen for forventet menstruasjon.

Clearblue anbefaler at du tester deg fra dagen for forventet menstruasjon. Graviditetshormonet øker imidlertid raskt tidlig i svangerskapet, og Clearblue Advanced fertilitetsmonitor kan brukes til graviditetstesting opptil 3 dager før forventet menstruasjon. I klinisk testing med prøver fra tidlig svangerskap ga Clearblue Advanced fertilitetsmonitor følgende resultater:

Antall dager før forventet menstruasjon	% av prøver fra gravide kvinner som ga resultatet "Gravid"
-1	96%
-2	91%
-3	74%

# Clearblue

ADVANCED

fertilitetsmonitor  
Graviditetstester



Disse testene må bare brukes for å teste graviditet ved bruk av Clearblue Advanced fertilitetsmonitor. De kan ikke brukes med noen annen Clearblue monitor. Du må lese bruksanvisningen som følger med monitoren, før du bruker disse testene. Første gang du bruker monitoren må du sette opp en ny syklus for du tester om du er gravid.

Dersom du har mistet bruksanvisningen til monitoren, kan du ringe Clearblue Careline og be om å få tilsendt en ny, eller du kan laste ned en kopi fra [www.clearblue.com](http://www.clearblue.com).

## Hvor nøyaktig er Clearblue Advanced fertilitetsmonitor?

Ved laboratorietesting er det vist at Clearblue Advanced fertilitetsmonitor påviser graviditet med over 99 % nøyaktighet fra og med dagen for forventet menstruasjon.

Produktrådgivningen er åpen mandag til fredag kl. 9.00-12.00 unntatt helligdager. Din samtale vil bli besvart på engelsk og om nødvendig bli håndtert via en oversetter.

**800 10 218**

Samtalen er gratis og vil bli tatt opp med tanke på opplæring og kvalitetskontroll. Vennligst oppgi partinummeret fra produktforpakningen.

[www.clearblue.com](http://www.clearblue.com)

Norsk

## Resultatet av graviditetstesten



Resultatet er "Gravid", og du bør oppsøke en lege/jordmor, som vil gi deg råd om neste steg.



Resultatet er "Ikke gravid". Det kan være at du ikke er gravid, eller dersom du har testet for forventet menstruasjon, kan det hende at nivået av graviditetshormonet ikke er høyt nok til å kunne påvises av testen. Test på nytt på tidspunktet for forventet menstruasjon.

Dersom du tester på dagen for forventet menstruasjon og resultatet fremdeles er "Ikke gravid", kan det hende at du ønsker å teste på nytt etter 3 dager. Dersom også den testen gir resultatet "Ikke gravid" og du fremdeles ikke har fått menstruasjon; oppsøk en lege/jordmor.

## Testfeil

Dersom det oppstår en feil under testing, vil skjermen vise en feilmelding. Se heftet med monitoren bruksanvisning for ytterligere informasjon.

Clearblue er et varemerke.

Produsent :SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH,  
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy,  
Genève, Sveits.  
© 2014 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

For *in vitro* diagnostisk bruk. **IVD**

For hjemmebruk.

Må ikke svelges.

Ikke for innvortes bruk.

Oppbevares tørt og ved romtemperatur.

Bruk ikke en test dersom folieinnpakningen den ligger i, er skadet.

Bruk ikke en test dersom holdbarhetsdatoen er passert.



	Produsent		Til engangsbruk
	Batchkode		<i>In vitro</i> diagnostisk medisinsk utstyr
	Brukes innen		Temperaturreråde 2°C - 30°C

## Testing

Monitoren vil bare be om fertilitetstester. Den vil beregne tidspunktet for forventet menstruasjon, men du kan teste om du er gravid på hvilke som helst dager, såfremt du har satt opp en syklus. Du kan teste én gang i testperioden. Dersom du får en feilmelding, kan du imidlertid utføre testing én gang til, med en ny test. Dersom du ønsker å oppsamle urin til testing senere, for eksempel dersom du må på toalettet før testvinduet starter, må du oppbevare testen ved romtemperatur i en ren, tørr beholder til du er klar til å teste. Husk å teste innenfor testperioden.


- 1 Når du er klar til å teste, velger du riktig test. Graviditetstester er pakket i hvit folie.



- 2 Åpne folien, ta testen ut og bruk den umiddelbart.




Hold ikke testen med oppsugingsdelen pekende oppover, siden resultatet kan bli påvirket.

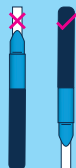

- 4 Velg testmetode:


**I urinstrålen**



Hold oppsugingsdelen pekende nedover og inn i urinstrålen i **kun 3 sekunder**.

ELLER

**Dypning**




Samle opp en urinprøve i en ren, tørr beholder og dypp oppsugingsdelen i urinen, som vist, i **kun 15 sekunder**.

- 5 Ta av hetten.




- 6 Plasser hetten over oppsugingsdelen. Tørk av overflødig urin.

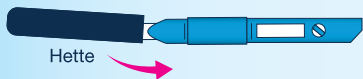


- 7 Sett testen umiddelbart inn i monitoren. Dersom monitoren er slått av; slå den på igjen og **vent til skjermbildet med Clearblue forsvinner før du setter inn testen.**

- 8 Finn testsporet.

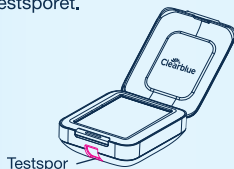


- 9 Hold monitoren vannrett, eller sett den på en plan overflate.


- 10 Sett testen inn slik at siden med avkuttet hjørne vender ned og den fargede siden av testen er på høyre side av testsporet.

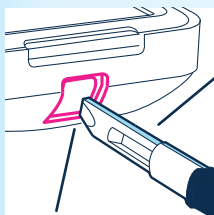

Siden med avkuttet hjørne skal vende ned

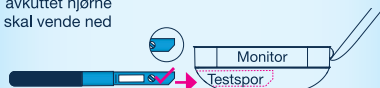

- 11 Trykk inn testen til du hører et klikk.

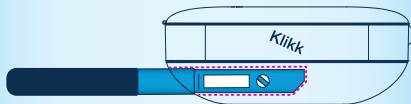

### DU MÅ IKKE

Sett **ikke** oppsugingsdelen inn i monitoren.



**Ikke** sett testen inn med det avkuttete hjørne pekende oppover.



Sett **ikke** hetten inn i monitoren.



- 12 Monitoren vil bekrefte at testen er satt inn korrekt og finne ut om det er en fertilitets- eller graviditetstest. Straks denne prosessen er fullført, vil en nedtelling komme til syne på skjermen.



Ikke fjern testen under nedtelling. Dersom du fjerner testen for tidlig, vil en feilmelding bli vist.

Skjermen vil slå seg av etter 1 minutt, men monitoren vil fortsette å analysere testen. Testlyset vil blinke.

- 13 Vent på resultatet i 5 minutter.

- 14 Dersom du slår monitoren på igjen, vil skjermen vise hvor lenge du må vente. Alarmen vil lyde når testingen er fullført, og lyset vil slutte å blinke.

- 15 Dersom monitoren er slått av, slå den på og fjern testen.

- 16 Avles resultatet. Resultatet kan bare avleses på monitoren og kan ikke forstås ved å se på eventuelle linjer på testen.

- 17 Kast testen sammen med vanlig husholdningsavfall. Du må ikke bruke en test flere ganger.